

ご自宅で
簡単・手軽

※唾液を採取するだけの簡単な検査です。

唾液採取後
キットを郵送

送料無料

※返信用封筒付
(料金受取人払郵便)

雑貨品扱いとなります。
医療品ではございません。

自費検査

(保険適用ではございません)

新型コロナウイルス PCR検査

唾液採取用検査キット

~~2,980円~~ 更にお求めやすくなりました!

2,380円 (税別)

大切な社員と家族を守るため、
気になったらすぐに検査を!

東亜産業 新型コロナ
PCR検査センター

詳しくは
弊社ホームページを
ご参照ください。
※ご予約は不要です。



大切な家族や自分を守るため、気になったらすぐに検査を!

SARS-CoV-2

新型コロナウイルス PCR検査

唾液採取用検査キット

ご自宅で
簡単・手軽

※唾液を採取するだけの簡単な検査です。
詳細については同梱の説明書をご覧ください。

唾液採取後
キットを郵送

送料無料

※返信用封筒付
(料金受取人払郵便)

ご返送いただいたキットを弊社受領後、

最短3時間後 検査状況※をメールで通知
(ご指定のメールアドレス/LINE/SMSにて)

※唾液検体につき、新型コロナウイルスに特徴的なRNAが検出されるかの、
検査状況を(高リスク/低リスク)にてご報告いたします。
※感染の有無については専門の病院又は最寄りの保健所にご相談ください。

自費検査

品番:26130

品名:PCR検査キット

【1ケース入数】20個入
【発注単位】20個単位で
ご発注ください

■PCR検査キット内容物

- ・唾液(検体)採取キット
- ・唾液コレクター
- ・唾液収集用チューブ
- ・保存液
- ・キャップ
- ・返信用封筒付
- ・ナンバリングシール
- ・説明書
- ・申込書

MADE IN CHINA

検査名:新型コロナウイルスPCR検査
検査種類:核酸増幅法(RT-PCR法)
検査手段:郵送
対象地域:全国対応可能

■専用カラーパッケージ サイズ:H166xW220xD40mm

※イラストはイメージです。

検査の流れ

- 採取時に口を水で軽くゆすぐ。
唾液保存容器に付属の「ろうと」を
しっかり取り付け、唾液を採取する。
- 唾液を採取容器の「1~2ml」の
目盛りくらいまで入れる。
泡などなるべく入らないように注意。
- 「ろうと」を外し、保存液を唾液保存容器に
全て入れて、フタをしっかりと閉める。
- フタをした唾液保存容器と
お申込み用紙に
ナンバリングシールを貼り付ける。
- 唾液保存容器を密封袋に入れる。
密封袋がしっかり閉じているか
確認する。
- お申込み用紙へ必要事項を記入し、返信用封筒へ
「唾液保存容器が入った密封袋」「お申し込み用紙」
「ナンバリングシール」を入れて、封筒を閉じる。
封筒の裏面に差出人のお名前とご住所を記入する。

お子様から
ご年配の方まで、
安心してご利用
いただけます。

- ✓ 不特定多数と接する機会の多い方
- ✓ 感染リスクの高い業種の方
- ✓ 大事な試合や試験前の方
- ✓ 定期的に検査を受ける必要がある方
- ✓ 仕事などの都合で病院に行く時間が無い方
- ✓ 高齢者や基礎疾患を抱えている家族がいる方

ご返送いただいたキットを弊社受領後、

最短3時間後 検査状況※をメールで通知
(ご指定のメールアドレス/LINE/SMSにて)

※唾液検体につき、新型コロナウイルスに特徴的なRNAが検出されるかの、検査状況を(高リスク/低リスク)にてご報告いたします。
※感染の有無については専門の病院又は最寄りの保健所にご相談ください。